




13. Nu utilizați aplicatoare deteriorate. Utilizarea unui aplicator deteriorat poate duce la amplasarea necorespunzătoare a unei cleme și poate cauza căderea clemei de pe țesut. Când sunt închise, vârfurile fălcilor trebuie să fie aliniate direct și nu decalate. Verificați întotdeauna alinierea fălcilor aplicatorului înainte de utilizare. În caz contrar, pacientul poate fi rănit, deoarece cleva poate fi puternic deformată în timpul închiderii, împiedicând blocarea corectă.
14. Următorii factori au o influență serioasă asupra închiderii unui clip: starea unui aplicator, forța utilizată de chirurg pentru a închide clipul, dimensiunea țesutului ligaturat și caracteristicile clipului în sine.
15. Ca în cazul tuturor celorlalte tehnici de ligatură, este necesar să se verifice locul ligaturii după aplicarea unei cleme, pentru a se asigura că aceasta a fost amplasată corespunzător.
16. Dacă se efectuează o procedură endoscopică, confirmați întotdeauna că cleva rămâne în aplicator după introducerea aplicatorului și a clemei prin intermediul unei canule.
17. Inspectați întotdeauna zona pentru hemostază înainte de finalizarea procedurii. Sângerarea poate fi controlată prin plasarea de cleme suplimentare, electrocauterizare sau suturi chirurgicale.
18. Clipurile de legare Click'aV® și Click'aV Plus™ pot fi deschise cu un dispozitiv special conceput pentru îndepărtarea clipurilor. Este foarte recomandat ca dispozitivul de îndepărtare să fie ușor disponibil în timpul intervențiilor chirurgicale care implică utilizarea clipurilor de legătură Click'aV® și Click'aV Plus™. Clipul deschis trebuie aruncat și nu trebuie reaplicat din nou, chiar dacă nu sunt vizibile leziuni. Clipul deschis cu dispozitivul de îndepărtare poate dezvolta microfisuri și un astfel de clip se poate rupe sau aluneca de pe vas, ducând la hemoragie.
19. Grena nu promovează și nu recomandă nicio practică chirurgicală specifică. Tehnica chirurgicală, tipurile și dimensiunile țesuturilor și vaselor adecvate pentru ligaturarea cu clipurile de legătură Click'aV® și Click'aV Plus™ sunt responsabilitatea chirurgului.
20. Aruncați toate cartușele de clipuri deschise, indiferent dacă toate clipurile au fost utilizate sau nu, deoarece sterilitatea și funcționalitatea completă a dispozitivului pot fi garantate dacă clipurile sunt utilizate la scurt timp după deschiderea ambalajului.
21. Materialul implantat este un polimer acetal neabsorbabil. Materialul utilizat nu necesită restricții cantitative privind clemele aplicate pacientului.
22. Utilizați imediat după deschidere, deoarece depozitarea dispozitivelor după deschiderea ambalajului duce la contaminarea acestora și creează un risc de infectare a pacientului.
23. Aveți grijă să aruncați produsul și ambalajul după utilizare, precum și dispozitivele neutilizate, dar deschise, în conformitate cu practicile de eliminare a deșeurilor spitalicești și cu reglementările locale, inclusiv, fără limitare, cele referitoare la sănătatea și siguranța oamenilor și la mediu.
24. Acest produs este destinat utilizării pentru un singur pacient și pentru o singură procedură. Resterilizarea, reutilizarea, reprocesarea, modificarea pot duce la consecințe grave, inclusiv moartea pacientului.
25. Dacă a avut loc un incident grav în legătură cu dispozitivul, acesta trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.
26. Manifestați prudență atunci când există posibilitatea expunerii la sânge sau fluide corporale. Respectați protocoalele spitalului privind utilizarea echipamentului și a îmbrăcămintei de protecție.

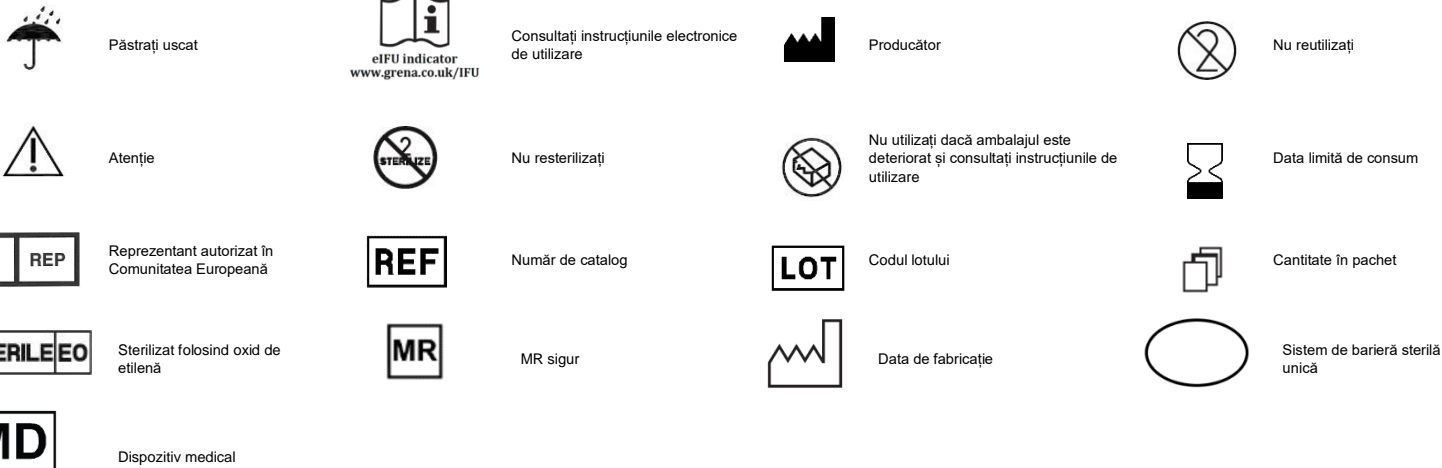

*Copiile tipărite ale instrucțiunilor de utilizare livrate împreună cu produsele Grena sunt întotdeauna în limba engleză. Dacă aveți nevoie de o copie tipărită a IFU în altă limbă, puteți contacta Grena Ltd. la [ifu@grena.co.uk](mailto:ifu@grena.co.uk) sau + 44 115 9704 800.*

*Vă rugăm să scanați codul QR de mai jos cu aplicația corespunzătoare. Acesta vă va conecta la site-ul Grena Ltd. unde puteți alege eIFU în limba preferată.*

*Puteți accesa direct site-ul web tastând [www.grena.co.uk/IFU](http://www.grena.co.uk/IFU) în browserul dvs.*

*Asigurați-vă că versiunea pe suport de hârtie a IFU pe care o dețineți este cea mai recentă revizuire înainte de a utiliza dispozitivul. Utilizați întotdeauna IFU în cea mai recentă revizuire.*

